

AIRFLOW® MAX NÁSADEC

DENNÍ ÚDRŽBA A ČIŠTICÍ PROTOKOL V PŘÍPADĚ UCPÁNÍ



Váš AIRFLOW® MAX násadec se může ucpat. Možné příčiny:


- ▶ Vlhkost ve vzduchovém kanálku.
- ▶ Špatná údržba násadce.

Abyste předešli ucpání násadce, dodržujte doporučené EMS postupy pro čištění:

PROVEĎTE PŘED KAŽDÝM POUŽITÍM

1- Vyčistěte vodní kanálek:

- ▶ Výstup trysky umístěte nad plivátko stomatologického křesla.
- ▶ Stlačeným vzduchem profoukněte vodní kanálek.

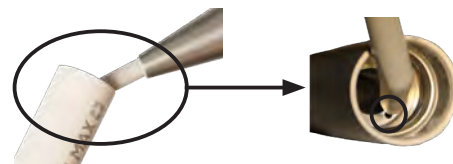

2- Vyčistěte vzduchový kanálek pomocí nástroje Easy Clean:

- ▶ Zaveďte Easy Clean do AIRFLOW® MAX násadce.
- ▶ Pomocí injekční stříkačky s nejméně 20 ml vody propláchněte vzduchový kanálek.
- ▶ Pečlivě vzduchový kanálek vyfoukejte stlačeným vzduchem.
- ▶ Pro lepší pochopení se podívejte na video na YouTube.



PODÍVEJTE SE
NA YOUTUBE
VIDEO



V případě neprůchodnosti postupujte podle EMS protokolu pro odstranění ucpání:

JAK ZPRŮCHODNIT AIRFLOW® MAX NÁSADEC

Připravte si následující čisticí roztok:

- ▶ Kyselina octová 20% (kapalina)
- ▶ Několik kapek (2-3) dentálního dezinfekčního prostředku (např. Neodisher® MediClean (Dr. Weigert, Enzol® (ASP), ...).

Postup:

- ▶ Naplňte sklenici výše uvedeným čisticím roztokem. Ponořte AIRFLOW® MAX násadec do vody až na rozhraní plastu/kovu.
- ▶ Vložte sklenici do ultrazvukové lázně¹ naplněné vodou.
- ▶ Pokud je to možné, nastavte teplotu na 50 °C a aktivujte ultrazvuk s obvyklým nastavením na dobu přibližně 15 minut.
- ▶ Opláchněte násadec vodou z vodovodu.
- ▶ Násadec opět vložte do nové sklenice naplněné do poloviny destilovanou vodou.
- ▶ Opakujte ultrazvukový proces po dobu přibližně 3 min.



Po tomto postupu proveďte obvyklý proces čištění násadce (viz Návod k použití přístroje).

V případě jakýchkoli dalších problémů s AIRFLOW® MAX násadcem se obraťte na zákaznickou podporu EMS. Kontakt: +420 725 382 904, servis.czsk@ems-ch.com.

¹ Ultrazvuková lázeň se používá pouze výjimečně, pokud je vodní kanálek ucpáný a každodenní údržba není účinná. Pokud se používá jako pravidelný postup údržby, může dojít ke zničení násadce a Vaše záruka zanikne.

Váš EMS After Sales Department - Červenec 2022



HEADQUARTERS

CH

NYON, SWITZERLAND

ELECTRO MEDICAL SYSTEMS SA
Chemin de la Vuarpillière 31
CH - 1260 Nyon
www.ems-dental.com/en/contact
www.ems-dental.com
T. +41 22 994 47 00
F. +41 22 994 47 01



WORLDWIDE EMS AFFILIATES

DE

MUNICH, GERMANY

EMS ELECTRO MEDICAL SYSTEMS GMBH
Stahlgruberring 12
DE - 81829 München
T. +49 89 42 71 61 0
F. +49 89 42 71 61 60
E-mail: info@ems-ch.de

FR

FONCINE, FRANCE

EMS ELECTRO MEDICAL SYSTEMS FRANCE SARL
32, route de Pontarlier
FR - 39460 Foncine-le-Haut
T. +33 3 84 51 90 01
F. +33 3 84 51 94 00
E-mail: info@ems-france.fr

ES

MADRID, SPAIN

EMS ELECTRO MEDICAL SYSTEMS ESPAÑA SLU
C/ Tomás Bretón, 50-52 2ª planta
ES - 28045 Madrid
T. +34 91 528 99 89
E-mail: info@ems-espana.com

PT

LISBON, PORTUGAL

EMSPOR - ELECTRO MEDICAL SYSTEMS PORTUGAL, UNIPESSOAL LDA
Avenida Miguel Bombarda, 36, 6A
PT - 1050-165 Lisboa
T. +351 912 338 777
E-mail: info@ems-portugal.com

IT

MILANO, ITALY

EMS ITALIA S.R.L
Via Carlo Pisacane 7B
IT - 20016 Pero (MI)
T. +39 02 3453 8111
E-mail: dental@ems-italia.it

UK

CAMBRIDGESHIRE, UNITED KINGDOM

EMS UK LTD SUITE 2
Xenus House - Sandpiper Court
Phoenix Park - Eaton Socon
UK - St Neots, Cambridgeshire
PE19 8EP
T. +44 01480 587260
Email: info@ems-unitedkingdom.com

SE

STOCKHOLM, SWEDEN

EMS NORDIC AB
Hammarby Fabriksväg 61
SE - 120 30 Stockholm
T. +46 8 899 102
E-mail: info@ems-nordic.se

PL

KATOWICE, POLAND

EMS POLAND SP. Z O.O.
Al. Roździeńskiego 188H
PL - 40-203 Katowice
T. +48 32 4937060
E-mail: info@ems-poland.com

JO

AMMAN, JORDAN

EMS ELECTRO MEDICAL SYSTEMS JORDAN
No.2 - second floor, 195 Arar (Wadi Saqra) str.
JO - Amman

US

DALLAS, USA

EMS CORPORATION
11886 Greenville Avenue, Ste 120
US - Dallas, Texas 75243
T. +001 972 690 8382
F. +001 972 690 8981
E-mail: info@ems-na.com

AU

SYDNEY, AUSTRALIA

EMS OCEANIA PTY LTD
The Woolstores - Suite 3, Shed 73
4E Huntley Street
AU - Alexandria, NSW 2015
T. +61 405 095 867
E-mail: info@ems-oceania.com

JP

TOKYO, JAPAN

E.M.S. JAPAN KK
Eminent Ningyoucho Bld 6F,
9-18, Kobuna-cho, Nihombashi
JP - Chuo-ku, Tokyo, 103-0024
T. +81 (0) 3-6810-9351
F. +81 (0) 3-6810-9352
E-mail: emsjapan@ems-ch.com

CN

SHANGHAI, CHINA

医迈斯电子医疗系统贸易(上海)有限公司
E.M.S. ELECTRO MEDICAL SYSTEMS TRADING (SHANGHAI) CO., LTD.
24A, Jin Sui Mansion,
N°379 Pudong Nan Rd.
CN - Shanghai 200120
T. +86 21 3363 2323
E-mail: emschina@ems-ch.com

KR

SEOUL, SOUTH KOREA

EMS ELECTRO MEDICAL SYSTEMS KOREA LTD.
13, Beobwon-ro 8-gil, Songpa-gu
T. +82 70 7807 2875
E-mail: emskorea@ems-ch.com